

# SoftCompress

## Kompressionsbandagierung

Bei Kompressionsverbänden beugt eine Unterpolsterung Druckstellen und Hautschäden vor und kann zudem die Lebensqualität fördern<sup>1</sup>. Mit den Polstermaterialien von SoftCompress kann der Erfolg der Entstauungstherapie zudem deutlich gesteigert werden. Denn die vertikal verlaufenden Schaumstoffkanäle bilden eine einzigartige Oberflächenstruktur, die den Abfluss der Lympheflüssigkeit unterstützt. Die Bandagehilfen und Zusatzprodukte zeichnen sich, im Gegensatz zu häufig verwendeten Synthetikmaterialien, durch eine besonders hautfreundliche Baumwolloberfläche aus. Diese ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten. Zudem ermöglichen die SoftCompress Bandagehilfen dem Patienten eine einfache Eigenanwendung und sichern somit den Therapieerfolg langfristig.

### Eigenschaften

- + Kern aus hochwertigem Schaumstoff
  - Optimale Druckübertragung
  - Ideale Druckverteilung
- + Vertikal genähte Schaumstoffkanäle
  - Steigerung des Lymphabflusses
  - Effektiv gegen Bindegewebsfibrosen
- + Besondere Hautverträglichkeit durch Baumwolloberfläche
  - Atmungsaktiv
  - Anschmiegsam
- + Abschnürung in Gelenkbeugen wird verhindert
- + Schützt vor dem Einschneiden durch Bindenkanten
- + Zeitersparnis bei der Bandagierung
- + Erleichterung der Selbstbandagierung
- + Waschbar bis zu 60 °C
- + Bei niedriger Temperatur trocknergeeignet
- + Desinfektion und Aufbereitung möglich – dadurch langfristig kostensparend<sup>2</sup>
- + **SoftCompress Bandagehilfen können unter Kurzzugbinden oder in Verbindung mit medizinischen adaptiven Kompressionssystemen getragen werden**

### Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- Phlebödem
- Posttraumatisches Ödem
- Postoperatives Ödem
- Fibrosen

### Materialzusammensetzung

- Bezug: 100 % Baumwolle
- Schaumstoff: 100 % Polyurethan

### Kontraindikationen

Siehe Seite 37

### Farbe



Weiß



Mit Baumwolle



Waschbar  
60 Grad



Trockner-  
geeignet



### Schaumstoffkanäle

Die vertikal genähten Schaumstoffkanäle fördern den Lymphabfluss und helfen, Fibrosen aufzulockern.



### Wirkungsweise

Sichtbare Wirkungsweise der SoftCompress Bandagehilfe beim Beinlymphödem.

<sup>1</sup>Protz et al.. Kompressionsbandagierungen mit und ohne Unterpolsterung im Vergleich. Vasomed 2019; 31(3) 132-133.

<sup>2</sup>Die Produkte wurden gemäß DIN ISO TS 15883-5, SOD 19-002, EN ISO 17664, SOD 19-01 und der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ erfolgreich geprüft.

# Bandagehilfen

Die komfortablen SoftCompress Bandagehilfen können in der Phase 1 der KPE unter Kurzzugbinden oder in der Phase 2 unter medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (ACS Light oder Compression Wrap) getragen werden und sorgen für zusätzliche Kompression und Polsterung sowie eine ideale Druckverteilung. Durch die Verwendung der Bandagehilfen wird das Bandagieren schneller sowie effektiver und erleichtert auch dem Patienten die Selbstbandagierung.

## Für KPE Phase 1



**SoftCompress  
Bandagehilfe Unterschenkel**

Universalgröße  
Art. 6831



**SoftCompress  
Bandagehilfe Bein**

Universalgröße  
Art. 6821



**SoftCompress  
Bandagehilfe Arm**

Universalgröße  
Art. 6823

### Universalgröße

Bandagehilfen in Universalgröße sind an der Rückseite offen und werden mit Hilfe von Klettbindern bzw. einem elastischen Textilschlauch fixiert. Dadurch lässt sich die Bandagehilfe während der Therapie individuell auch an stark schwankende Umfangmaße anpassen.

**Serien- und Universalgrößen** sind an den entsprechenden Schnittmarkierungen kürzbar.

**Achtung:** Vor dem Kürzen zwischen den Quernähten muss das Produkt einmal gewaschen und vor dem Trocknen im nassen Zustand längsgedehnt worden sein.



## Für KPE Phase 2



**SoftCompress  
Bandagehilfe Unterschenkel**

Seriengrößen und nach Maß  
Art. 6830



**SoftCompress  
Bandagehilfe Bein**

Nach Maß  
Art. 6820



**SoftCompress  
Bandagehilfe Arm**

Seriengrößen und nach Maß  
Art. 6822

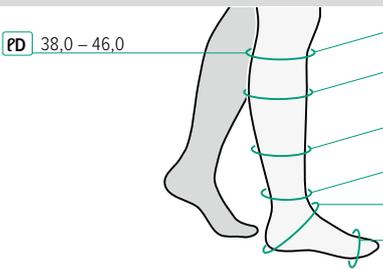
## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN		
		Seriengrößen	Maßanfertigung	Universalgröße
	<b>6831</b> <b>Bandagehilfe Unterschenkel</b> (für KPE Phase 1) inkl. 2 Pelotten für die Fußknöchel	–	keine PZN	13505730
	<b>6830</b> <b>Bandagehilfe Unterschenkel</b> (für KPE Phase 2)	Größe 1 · 13505687 Größe 2 · 13505693 Größe 3 · 13505701 Größe 4 · 13505718 Größe 5 · 13505724	keine PZN	–
	<b>6821</b> <b>Bandagehilfe Bein</b> (für KPE Phase 1) inkl. Bandagehilfe Unterschenkel Universal 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle 1 Kompressionsbinde (10 cm x 4 m) 1 Kompressionsbinde (12 cm x 4 m)	–	–	13505641
	<b>6820</b> <b>Bandagehilfe Bein</b> (für KPE Phase 2) inkl. 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	–	keine PZN	–
	<b>6823</b> <b>Bandagehilfe Arm</b> (für KPE Phase 1) inkl. 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	–	–	13505842
	<b>6822</b> <b>Bandagehilfe Arm</b> (für KPE Phase 2) inkl. 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	Größe 1 · 13505747 Größe 2 · 13505753 Größe 3 · 13505782 Größe 4 · 13505799 Größe 5 · 13505807 Größe 6 · 13505836	keine PZN	–

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

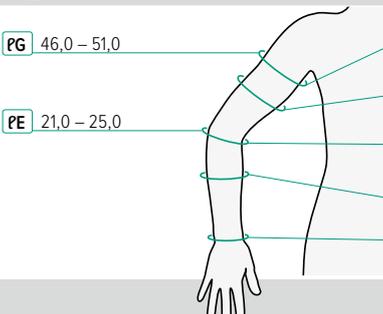
## Größentabellen Seriengrößen

### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel

Art. 6830 Länge in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm				
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
 PD 38,0 – 46,0	cD 27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0
	cC 29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5
	cB¹ 23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5
	cB 18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5
	cY 28,0 – 30,5	29,0 – 31,5	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0	35,0 – 38,5
	cA 18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5

**WICHTIG:** Seriengrößen werden nach Hautmaß ermittelt.  
Für Maßanfertigungen bitte „auf Zug“ messen.

### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm

Art. 6822 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
 PG 46,0 – 51,0	cG 30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5	40,0 – 44,0
	cF 28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5
PE 21,0 – 25,0	cE 25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	cD 23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	cC 14,5 – 16,0	16,0 – 17,5	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 24,0

# Kompressionsbinde und -platte

Die SoftCompress Bandagematerialien werden für die lymphologische und phlebologische Kompressionsbandagierung verwendet. Dank der weichen Oberfläche sind sie sehr anschmiegsam, hautfreundlich und atmungsaktiv.



## SoftCompress Kompressionsbinde

Art. 6835

Die dünnen, anschmiegsamen SoftCompress Kompressionsbinden erzeugen durch entsprechendes Anlegen bereits einen Kompressionsdruck. Die Kompressionsbinden verteilen den Druck der zusätzlich darüber aufgetragenen Kurzzugbinden gleichmäßig und verhindern dadurch Einschnürungen.



## SoftCompress Kompressionsplatte

Art. 6836

Die Kompressionsplatten können individuell zugeschnitten werden und sind somit in verschiedenen Körperregionen einsetzbar. Es wird empfohlen, die Schnittkanten abzunähen.

## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN Seriengrößen
<b>6835</b>	<b>Kompressionsbinde</b> (für KPE Phase 1)	
	5 mm, 8 cm x 4 m	Größe 1 · 13506043
	5 mm, 10 cm x 4 m	Größe 2 · 13506066
	5 mm, 12 cm x 4 m	Größe 3 · 13506072
	5 mm, 16 cm x 4 m	Größe 4 · 13506089
<b>6836</b>	<b>Kompressionsplatte</b> (für KPE Phase 1)	
	65 x 65 cm	Größe 1 · 13506095
	125 x 100 cm	Größe 2 · 13506103

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

## Größentabellen

### Juzo SoftCompress Kompressionsbinde

Art. 6835	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
Stärke in mm: 5,0 	1	400,0 x 8,0
	2	400,0 x 10,0
	3	400,0 x 12,0
	4	400,0 x 16,0

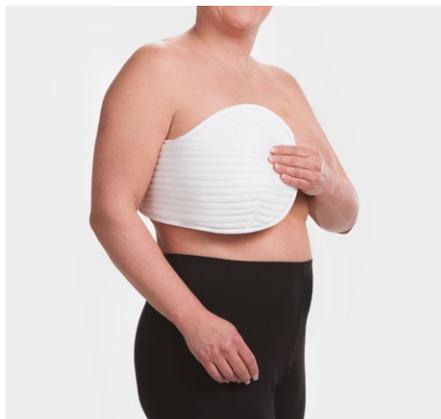
### Juzo SoftCompress Kompressionsplatte

Art. 6836	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	65,0 x 65,0
	2	125,0 x 100,0

# Zusatzprodukte

## SoftCompress

SoftCompress Einlagen bzw. Pelotten können unter Kompressionsbandagen oder -bekleidung getragen werden. Sie eignen sich besonders zur gezielten Druckerhöhung bei speziell lokalisierten Ödemen.



### SoftCompress Brusttrichter

Art. 6837

Der SoftCompress Brusttrichter dient als angenehme Einlage für Kompressions-BHs bzw. Thoraxbandagen, z. B. bei Brust- oder Thoraxwandödemen.



### SoftCompress Brustbandage

Art. 6838

Die SoftCompress Brustbandage kombiniert die positiven Eigenschaften des SoftCompress Materials mit einem Kompressions-BH. Der Brustumfang der Bandage ist verstellbar. Anwendbar ist die Brustbandage z. B. bei Brust- oder Thoraxwandödemen.



### SoftCompress Genitaleinlage für Frauen

Art. 6839

Die SoftCompress Einlage für den weiblichen Genitalbereich wird in eine Kompressionsstrumpfhose eingelegt. Dies sorgt bei Genitalödemen für eine gezielte Druckerhöhung und Polsterung sowie ideale Druckverteilung.



### SoftCompress Genitaleinlage für Männer

Art. 6840

Die SoftCompress Einlage (wendbar) für den männlichen Genitalbereich wird in eine Kompressionsstrumpfhose eingelegt. Die breite Kanalstruktur dient der Druckerhöhung und der Steigerung des Lymphabflusses, während sich die schmalen Kanäle für das Reduzieren fibrotischer Verhärtungen eignen. Zusätzlich wird bei Genitalödemen für eine gezielte Druckerhöhung und eine ideale Druckverteilung gesorgt.



### SoftCompress Einlage für die Kniekehle

Art. 6845

Die SoftCompress Einlage dient zur Abpolsterung der Kniekehle.



### SoftCompress Einlage für die Ellenbeuge

Art. 6842

Die SoftCompress Einlage dient zur Abpolsterung der Ellenbeuge.



### SoftCompress Pelotten für die Fußknöchel

Art. 6843

Die SoftCompress Pelotten für die Fußknöchel dienen zur Abpolsterung der Bisgaard'schen Kullissen im Knöchelbereich. Dies sorgt für gezielte Druckerhöhung und ideale Druckverteilung. Die Pelotten werden paarweise ausgeliefert.



### SoftCompress Handkompresse

Art. 6844

Die SoftCompress Handkompresse ist eine spezielle Handrückenpelotte mit zwei Fingeröffnungen. Sie sorgt für gezielte Druckerhöhung und ideale Druckverteilung.



### SoftCompress Kurzzugbinden

Art. 6846

Die Kurzzugbinden bestehen aus 100 % Baumwolle und ermöglichen Kompressionsverbände mit niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Sie sind bis 95 °C waschbar und mit Wasserdampf (121 °C) sterilisierbar.



### SoftCompress Rapidelast V Mullbinden

Art. 6847/6848

Die Rapidelast V Mullbinden bestehen aus 60 % Polyamid und 40 % Viskose. Sie dienen zur Fixierung von Kompressen und Polstermaterial vor allem auf empfindlicher Haut oder an Gelenken – ohne den Bewegungsspielraum einzuschränken. Verbände mit Rapidelast V sind rutschfest. Die hohe Elastizität des Gewebes macht seine Anwendung schnell und einfach.



### SoftCompress Schlauchverband

Art. 6849

Der Schlauchverband besteht aus 100 % Baumwolle und ist besonders dehnfähig und hautfreundlich. Er schützt die Haut ohne einzuschnüren und kann auch zum Fixieren von Einlagen verwendet werden.

## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN	
		Seriengrößen	Maßanfertigung
<b>6837</b>	<b>Brusttrichter</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	Cup A – B Cup C – D Cup E – F	Größe 1 · 13505919 Größe 2 · 13505925 Größe 3 · 13505931	keine PZN
<b>6838</b>	<b>Brustbandage</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F	Größe 1 · 13505859 Größe 2 · 13505865 Größe 3 · 13505871 Größe 4 · 13505888 Größe 5 · 13505894 Größe 6 · 13505902	keine PZN
<b>6839</b>	<b>Genitaleinlage für Frauen</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	20 x 20 cm 30 x 28 cm 40 x 32 cm	Größe 1 · 13505977 Größe 2 · 13505983 Größe 3 · 13506008	keine PZN
<b>6840</b>	<b>Genitaleinlage für Männer</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	20 x 28 cm 23 x 30 cm 26 x 32 cm	Größe 1 · 13505948 Größe 2 · 13505954 Größe 3 · 13505960	keine PZN
<b>6842</b>	<b>Einlage für die Ellenbeuge</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	10 x 13 cm (Maßanfertigung max. 13 x 16 cm)	13506020	keine PZN
<b>6843</b>	<b>Pelotten für die Fußknöchel</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	6,5 x 9 cm Paarweise verpackt	13506250	–
<b>6844</b>	<b>Handkomresse</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	8,5 x 24 cm	13506037	keine PZN
<b>6845</b>	<b>Einlage für die Kniekehle</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	13 x 17 cm (Maßanfertigung max. 19 x 23 cm)	13506014	keine PZN

Art.	Ausführung	PZN	
		Stück	Karton
<b>6846</b>	<b>Kurzzugbinde</b> (für KPE Phase 1)		<b>10 Stück</b>
	6 cm x 5 m 8 cm x 5 m 10 cm x 5 m 12 cm x 5 m	13506215 13506190 13506178 13506184	13506161 13506149 13506126 13506132
	<b>Rapidelast V Mullbinde</b> (für KPE Phase 1)		<b>20 Stück</b>
<b>6847</b>	6 cm x 4 m (für die Finger)	–	13506267
<b>6848</b>	4 cm x 4 m (für die Zehen)	–	13506273
<b>6849</b>	<b>Schlauchverband</b> (für KPE Phase 1)		
	6 cm x 20 m 8 cm x 20 m 10 cm x 20 m	13506296 13506304 13506310	– – –

## Größentabellen

### Juzo SoftCompress Brusttrichter

Art. 6837	Seriengrößen	Cup
	1	A – B
	2	C – D
	3	E – F

### Juzo SoftCompress Brustbandage

Art. 6838	Seriengrößen	Cup	Brustumfang in cm	Unterbrustumfang in cm
	1	A	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	2	B	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	3	C	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	4	D	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	5	E	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0
	6	F	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0

### Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Frauen

Art. 6839	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20,0 x 20,0
	2	30,0 x 28,0
	3	40,0 x 32,0

### Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Männer

Art. 6840	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20,0 x 28,0
	2	23,0 x 30,0
	3	26,0 x 32,0